

Neue Bezugsstoffe



APP

DALI

Neue Bezugstoffdesigns bei den EURO-SERVICE-DEPOTS

Zu den erfolgreichen Designs „Steine“ wurden nun zwei weitere Designs ins Programm aufgenommen. Sowohl das Modell „DALI“ als auch das Modell „APP“ wird in Kürze über die EURO-SERVICE-DEPOTS zu beziehen sein.

Das Besondere an dem Bezugstoff ist seine außergewöhnliche Zügigkeit, die das Verarbeiten sehr erleichtert. Des Weiteren ist der Stoff mit Silverpoint bestückt. Die antibakterielle Wirkung ist vom PFI in Pirmasens mit 93,74% bestätigt worden. Es handelt sich hierbei um einen sehr guten Wert. Die Rückseite des Bezugstoffes ist mit einer reaktivierbaren Klebefolie ausgestattet, die für das Aufkleben auf vielen Materialien verwendet werden kann. In Zukunft werden weitere neue Designs auf diesem Material vorgestellt werden.

Fragen Sie Ihr EURO-SERVICE-DEPOT

Varius



Neu im Programm der EURO-SERVICE-DEPOTS

Ein völlig neuer Einlagenrohling wird aktuell von den EURO-SERVICE-DEPOTS angeboten.

Bei der Basis der Varius-Einlage handelt es sich um eine vulkanisierte Spezialgummi-Qualität, bei der u.a. natürliche Materialien wie Zellulose-Fasern eingesetzt werden. Die Einlagen werden umweltgerecht in Deutschland produziert und entsprechen selbstverständlich den Vorgaben des MPG und sind somit bezüglich Toxikologie und Karzinogenität absolut unbedenklich.

Der Unterbau der Varius-Einlage ist durch die definierten Materialstärken im Gelenk-Bereich extrem starr und fest, gleichzeitig jedoch im Vorfußbereich extrem flexibel. Die Bruchgefahr des Materials wurde in Anlehnung an EN ISO 17707 (Dauerbiegeverhalten von Laufsohlenmaterialien) getestet.

Selbst bei 60.000 Biegungen zeigte das Material keinerlei Veränderungen. Trotz der extremen Belastung und definierter Vorschädigung gab es keinerlei Rißwachstum. Längs und Quergewölbe sind besonders stabil und können bei einer Temperatur von ca. 80 bis 100°C sowie einer Dauer von ca. 3 bis 4 Minuten unter Druck beliebig, auch mehrfach, verformt werden.

Durch die geringe Stärke des Rohlings bietet er sich auch an, um in Schuhen verwendet zu werden, die nicht über ein herausnehmbares Fußbett verfügen.

Fragen Sie Ihr EURO-SERVICE-DEPOT